

Les hele instruksjonen nøye før prøvetaking og sjekk at alle punktene er ivaretatt.

Inneholder

- 1 Prøverør for oppsamling av prøvemateriale og medfølgende prøvetakingspensel
- 2 Engangshansker
- Sort avfallspose
- 1 Beholder for oppsamling av prøve
- 1 Rør med absorpsjonspapir (benyttes som indre returbeholder)

Før prøvetaking

- Oppbevar prøven i romtemperatur etter prøvetaking og send til Lab1 for analyse så raskt som mulig, senest 3 dager etter prøvetaking
- Retursendinger må skje på mandager, tirsdager eller onsdager.

Prøvetakingen

1. Ta på engangshansker
2. Avgj avføringsprøven i oppsamlingsbeholderen. Det er viktig at ikke blandes med vann fra toalettet eller urin
3. Åpne pakningen med prøverøret og prøvetakingspensel. Løsne korken på prøverøret og plasser det på et stabilt underlag (røret inneholder et flytende medium og må derfor ikke velte).
4. Ta ut prøvetakingspenselen ved å holde over det røde merket for å unngå kontaminasjon
5. Overfør avføring fra oppsamlingsbeholderen til prøverøret ved hjelp av prøvetakingspenselen. Dypp penselen ned i avføringsprøven og roter til penselen er mettet med et tynt lag av prøve. Unngå eventuelle blodige, slimete og vandige deler av prøven.
6. Plasser penselen ned i prøverøret, brekk av den øverste delen av pinnen (over det røde merket) og skru korken godt igjen. Rist på røret til prøven har løst seg opp i prøvemediumet.
7. Legg oppsamlingsbeholderen i den svarte avfallsposen og kastes på egnet sted
8. Merk prøverøret med navn og fødselsnummer og noter tidspunkt for prøvetakingen (ÅÅÅÅ-MM-DD)
9. Legg prøverøret i returbeholderen som inneholder absorpsjonspapir. Lukke beholderen
10. Oppbevar prøven i romtemperatur og send Lab1 for analyse så raskt som mulig, senest 3 dager etter prøvetaking.

Retursending

Det er du selv som er ansvarlig for å sende prøvene tilbake til oss.

1. Fyll ut rekvisisjonsskjemaet fullstendig og husk signatur på baksiden. Husk på merke navn og fødselsnummer på prøverøret.
2. Legg prøven og rekvisisjonsskjemaet inn i DHL-posen og lim igjen posen
3. Sørg for at prøven blir sendt til Lab1 samme dag som prøvetakingen er utført.
4. Bestill opphenting fra DHL (les egen instruksjon for returforsendelse til Lab1). Planlegg tidspunktet for retursending. **NB! Retursendinger må skje på mandager, tirsdager eller onsdager.**
5. Pakken er da klar for at DHL kan komme og hente den der du har avtalt henteadresse og tidspunkt.

Hvis mulig kan prøven leveres direkte til Lab1 sitt laboratorium i Sandvika:

Elias Smiths vei 10, inngang D, 1337 Sandvika.