


## Forsendelse

1. Fyll ut rekvisisjonsskjemaet fullstendig
2. La prøvene ligge i kjøleskapet inntil de sendes
3. Etter at all prøvetaking er gjort (alle 3 dagene), legges alle tre posene i den ferdig frankerte konvolutten til Lab1. Legg også med rekvisisjonsskjemaet. Konvolutten kan nå forsegles.
4. Prøvene bør sendes til Lab1 samme dagen som den siste prøveinnsamlingen.
5. Den ferdig frankerte konvolutten er nå klar til å sendes fra ditt lokale postkontor/post i butikk/postkasse.

Hvis mulig, kan også prøven leveres direkte til Lab1 sitt laboratorium i Sandvika; **Elias Smiths vei 10, 1337 Sandvika.**

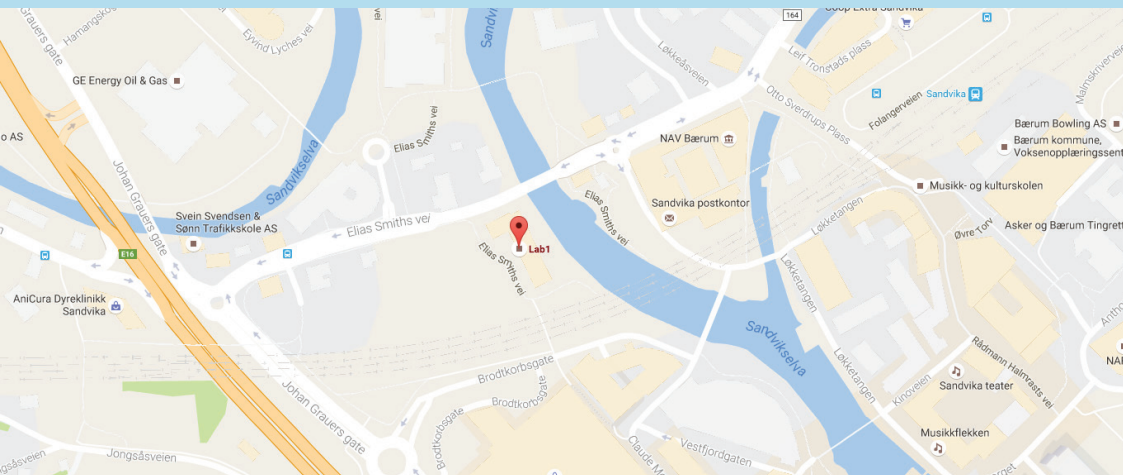

## Genova Diagnostics - CPx3 Comprehensive Parasitology

Inneholder:

- **Dag 1 pose**
  - 1 prøverør med grønn kork
  - 1 beger for avføring
  - 1 Latex-hanske
  - 1 absorpsjonspute/belegg
- **Dag 2 pose**
  - 1 prøverør med grønn kork
  - 1 beger for avføring
  - 1 Latex-hanske
  - 1 absorpsjonspute/belegg
- **Dag 3 pose**
  - 1 prøverør med grønn kork
  - 1 prøverør med gul kork
  - 1 beger for avføring
  - 1 Latex-hanske
- **Rekvisisjonsskjema**
- **Svarkonvolutt til Lab1**

Kontakt Lab1 hvis det er noe du er usikker på vedrørende denne testen eller om noe av testutstyret skulle mangle.



[www.lab1.no](http://www.lab1.no)



[firmapost@lab1.no](mailto:firmapost@lab1.no)



+47 21 06 35 50



Lik oss på facebook: **Lab1**

# Genova Diagnostics - CPx3 Comprehensive Parasitology

## Før prøvene tas

**Les instruksjonene nøye!** Sjekk datoene på innsamlingsrørene som følger med. Hvis noen har gått ut på dato, kontakt Lab1 for nytt prøvetakingsutstyr. Det skal ikke samles inn avføring under en akutt gastrointestinal smittsom sykdom. Vent minst i 4 uker etter koloskopi eller barium klyster før prøven tas.

- **2 uker før prøven tas** – Ved bruk av antibiotika, anti soppmidler, kosttilskudd for gunstig tarmflora (acidophilus osv.), eller konsumering av matvarer som inneholder gunstig flora (f.eks. Activia®), vent minst 14 dager fra siste dose med å ta prøve. Hvis du har fått en annen beskjed fra lege/behandler, følg deres anbefaling.
- Innta vanlig kost siste 2 – 3 dager før prøven tas.
- Prøvene over 3 dager og tas fortløpende. Det anbefales at prøvene tas **fredag, lørdag** og **søndag**, eller **lørdag, søndag** og **mandag**.

## Innsamling av prøvemateriale - dag 1

1. Uriner i toalettet om nødvendig. Avføringen samles inn i oppsamlingsboksen. Ikke la urin komme i oppsamlingsboksen.
2. Prøverøret har en skje på innsiden av korken. Bruk denne skjeen til å samle inn avføring fra oppsamlingsboksen. Ta med avføring fra forskjellige steder og sørg for å ta med puss og blod hvis det er til stede. Det er væske i det grønne røret. Fyll opp prøverøret med grønn kork med avføring fra oppsamlingsboksen slik at væske og avføring når opp til den røde streken. Sørg for ikke fylle over den røde streken.
3. Bruk skjeen til å blande prøverørets innhold godt med avføringen slik at konsistensen blir grøtete.
4. Skriv navnet og prøvetakingsdatoen på etiketten på flasken.
5. Plasser prøverøret i posen merket *Biohazard* Day 1 og plasser hele posen i kjøleskapet. **Posen og dets innhold skal ikke fryses!**
6. Det som er til overs kan nå kastes.

## Innsamling av prøvemateriale - dag 2

1. Bruk utstyret i posen merket *Biohazard* Day 2 og følg trinn 1 – 6 for innsamling av prøvemateriale dag

## Innsamling av prøvemateriale - dag 3

1. Skriv dato for denne dagen på rekvisisjonsskjemaet.
2. Bruk utstyret i posen merket *Biohazard* Day 3, følg trinn 1 – 6 for innsamling av prøvemateriale dag 1, og fyll opp prøverøret med **gul og grønn kork**.
3. Plasser så hele posen i kjøleskapet helt til forsendelse. **Posen og dets innhold skal ikke fryses!**