



PRIVAT
MEDISINSK
LABORATORIUM

Forsendelse

1. Plasser Monovetten i transporthylsen og skru korken godt igjen.
2. Fyll ut rekvisisjonsskjemaet. Det er viktig å fylle ut alle felt.
3. Plasser transporthylsen med urinprøven og det utfylte rekvisisjonsskjemaet tilbake til pappesken. Forsegl pappesken med en tape-bit.
4. Pappesken er nå klar til å sendes fra ditt lokale postkontor/post i butikken/postkasse.


Hvis mulig, kan også prøven leveres direkte til Lab1 sitt laboratorium i Sandvika; **Elias Smiths vei 10, 1337 Sandvika.**

Prøvetaking Peptider i urin

Inneholder:

- Monovette med pipettespiss
- Transporthylse med skrukork
- Rekvisisjonsskjema til Lab1
- Ferdig frankert pappeske med prøvetakingsutstyr

Kontakt Lab1 hvis det er noe du er usikker på vedrørende denne testen eller om noe av testutstyret skulle mangle.

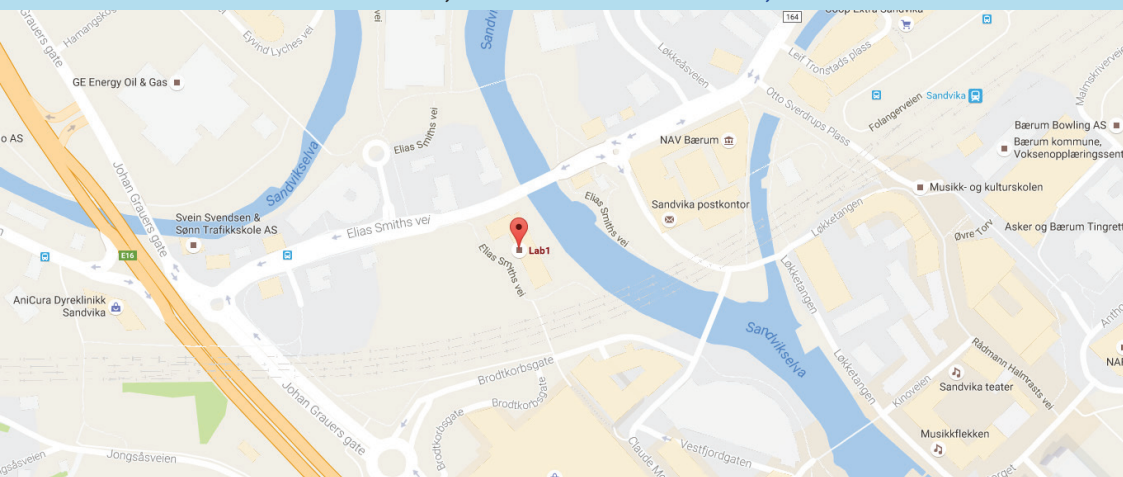

www.lab1.no



firmapost@lab1.no



+47 21 06 35 50



Lik oss på facebook: **Lab1**


1

Før prøven tas:

1. Det er viktig å spise variert de siste 2-3 ukene før prøven tas
2. Testen må ikke utføres under menstruasjon
3. Reduser væskeinntaket for å unngå overdreven fortynning av urin. Begrens inntaket til 3 x 2,5 dl. de siste 24 timer før testen skal tas. Pass på at ikke mer enn 2,5 dl. av dette er konsumert etter kl. 20.00
4. **Det er vesentlig at instruksjonene leses nøye og etterfølges da feil prosedyre kan påvirke resultatet av analysen!**
5. Ikke kast pappesken som prøvetakingsutstyret kom i. Denne skal benyttes til forsendelse senere

2

Klargjør det medfølgende utstyret.

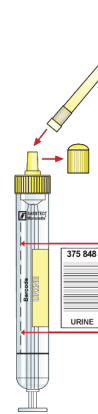

Skriv navn og fødselsdato


3

Første morgenurin samles i et urinprøveglass eller en **REN** kopp/et glass (urinprøveglass følger ikke med).




4

Sug fult opp med urin i monovetten fra urinprøveglasset. **Dette må gjøres umiddelbart og innen 5 minutter slik at testen ikke blir ødelagt!**

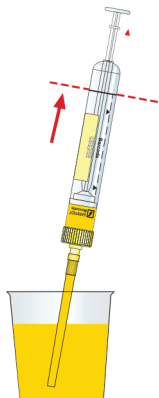

5

Bland prøven godt ved å vente Monovetten 5 - 10 ganger

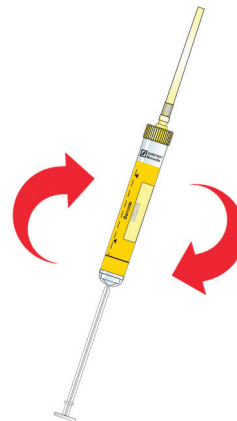

6

Fjern pipettetippen og brenk av oppsugingsstemplett. Sett på korken.

