

Les hele instruksjonen nøye før prøvetaking og sjekk at alle punktene er ivaretatt.

Inneholder

2 Serumrør med gel (gul kork)
2 Transporthylse

1 Rekvisisjonsskjema
1 Ferdig frankert retureske


Prøvetakingen

OBS! Blodprøven tas av kvalifisert personell enten ved et legekontor, klinikk eller et sykehus.

1. Blodprøvene tas på veneblod.
Tapp veneblod fra pasient til
nødvendige prøverør er fylt opp.



2. Etter at blodprøvene er tatt,
bland prøverørene godt ved å
vippe dem fram og tilbake
ca. 10 ganger.

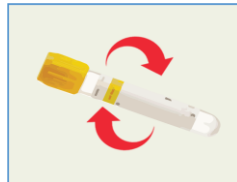

3. La prøverøret stå i
**minst 15 minutter etter
prøvetaking før den
sentrifugeres i 10 minutter.**



4. Plasser **den sentrifugerte
blodprøven** i transporthylsen.

Retursending

Det er du selv som er ansvarlig for å sende prøvene tilbake til oss. **Viktig! Send blodprøven samme dag som den er tatt!**

1. Fyll ut rekvisisjonsskjemaet fullstendig og husk signatur på baksiden. Merk navn, dato for prøvetaking og fødselsnummer på prøverøret.
2. Plasser transporthylsen med blodprøven og rekvisisjonsskjemaet i den ferdig frankerte returesken og forsegl denne med forseglingsetiketten.
3. Returesken er nå klart til å sendes fra ditt lokale postkontor/post i butikk/postkasse.

Hvis mulig kan prøven leveres direkte til Lab1 sitt laboratorium i Sandvika:

Elias Smiths vei 10, inngang D, 1337 Sandvika.