

Les hele instruksjonen nøye før prøvetaking og sjekk at alle punktene er ivaretatt.

Inneholder

| | |
|--|--|
| 1 EDTA rør (lilla kork) | 1 Isoporeske med lokk tilpasset Cool Transport Container |
| 2 Serumrør med gel (gul kork) | 1 Strikk for å feste lokket til Isoporesken |
| 1 transporthylse til EDTA røret | 1 Rekvisisjonsskjema |
| 1 Cool Transport Container-kjøleboks (til serumrør gul kork) | 1 DHL pose ferdig merket for returforsendelse |

Før prøvetaking

1. **Prøven skal tas fastende.** Det vil si at du bør faste fra kl 22:00 kvelden før prøvetakingen. Du kan drikke litt vann på morgenen før prøvetaking.
2. Ta ut prøveglassene fra kjøleboksen før den fryses. Prøveglassene kan du oppbevare i romtemperatur.
3. Husk å fryse ned Cool Transport Container med en gang du mottar utstyret (minst 8 timer før forsendelse).
VIKTIG! Denne må fryses liggende!
4. Ta med den frosne kjøleboksen, isoporesken og prøveglasset dit du skal ta prøven.
5. Prøvetaking **må** skje på **mandager, tirsdager eller onsdager.**
- 6.

Prøvetakingen

OBS! Blodprøven tas av kvalifisert personell enten ved et legekantor, klinikk eller et sykehus.

1. Blodprøvene tas på veneblod.
2. Etter at blodprøvene er tatt, bland prøverørene godt ved å vippe dem fram og tilbake ca. 10 ganger.
3. EDTA røret (lilla kork) skal ikke sentrifugeres, den skal blandes godt og oppbevares i romtemperatur. **Viktig: røret med lilla kork skal IKKE fryses eller settes til kjøling.** Den skal sendes i romtemperatur.
4. 15 minutter etter prøvetaking skal serumrørene med gel (gul kork) sentrifugeres i 10 minutter.
5. Plasser de to sentrifugerte serumrørene (gul kork) i den frosne Cool Transport Containeren og plasser denne i isoporesken. Slå strikken rundt isoporesken og lokket slik at lokket sitter fast til isoporesken (prøvene vil da fryse av seg selv i Cool Transport Containeren). Deretter oppbevares blodprøvene (gul kork) i fryseren din inntil forsendelse.

Retursending

Det er du selv som er ansvarlig for å sende prøvene tilbake til oss.

1. Fyll ut rekvisisjonsskjemaet fullstendig og husk signatur på baksiden. Merk navn og fødselsnummer på prøverørene.
2. EDTA røret (lilla kork) legges i transporthylsen og skal **ikke** fryses/kjøles. Den oppbevares i romtemperatur. Deretter festes transporthylsen med EDTA røret utenpå isoporesken med strikk.

3. Legg isoporesken med serumrørene samt rekvisisjonsskjemaet og transporthylsen med blodprøven inn i DHL-posen og lim igjen posen.
4. Sørg for at blodprøvene blir sendt til Lab1 samme dag som prøvetakingen er utført. Prøvetakingen må skje på mandager, tirsdager eller onsdager.
5. Bestill opphenting fra DHL (les egen instruksjon for returforsendelse til Lab1). Planlegg tidspunktet for retursending. **NB! Retursendinger må skje på mandager, tirsdager eller onsdager.**
6. Pakken er da klar for at DHL kan komme og hente den der du har avtalt henteadresse og tidspunkt.

Hvis mulig kan prøven leveres direkte til Lab1 sitt laboratorium i Sandvika:

Elias Smiths vei 10, inngang D, 1337 Sandvika.