

Les hele instruksjonen nøye før prøvetaking og sjekk at alle punktene er ivaretatt.

Inneholder

- | | |
|-------------------------|--|
| 1 EDTA rør (lilla kork) | 1 Rekvisisjonsskjema |
| 1 Transporthylse | 1 Retureske ferdig merket for returforsendelse |
| | 1 Forseglingsetikett |

Før prøvetaking

- **Prøven skal tas fastende.** Det vil si at du bør faste fra kl 22:00 kvelden før prøvetakingen. Du kan drikke litt vann på morgenen før prøvetaking.
- **Blodprøven skal IKKE fryses. Den oppbevares i romtemperatur.**
- Sørg for å postlegge prøven samme dag som den er tatt.

Prøvetakingen

OBS! Blodprøven tas av kvalifisert personell enten ved et legekantor, klinikk eller et sykehus.

1. Blodprøven tas på veneblod. Samle inn veneblod fra pasient.
2. Etter at blodprøven er tatt, bland prøverøret godt ved å vippe fram og tilbake ca. 10 ganger.
3. Plasser prøverøret i transporthylsen.

Retursending

Det er du selv som er ansvarlig for å sende prøvene tilbake til oss.

1. Fyll ut Lab1 rekvisisjonsskjemaet.
2. Plasser transporthylsen med blodprøven og rekvisisjonsskjemaet i den ferdig frankerte returesken og forsegl denne med forseglingsetiketten.
3. Returesken er nå klar til å sendes fra ditt lokale postkontor/post i butikk/postkasse.

Hvis mulig kan prøven leveres direkte til Lab1 sitt laboratorium i Sandvika:
Elias Smiths vei 10, inngang D, 1337 Sandvika.