

Les hele instruksjonen nøye før prøvetaking og sjekk at alle punktene er ivarettatt.

Inneholder

1 EDTA rør (lilla kork)	1 Isoporeske med lokk tilpasset Cool Transport Container
1 Na-Fluor (NaF – rosa kork)	1 Strikk for å feste lokket til Isoporesken
2 Serumrør med gel (gul kork)	1 Rekvisisjonsskjema
2 transporthylse til EDTA og Na-Fluor rørene	1 DHL pose ferdig merket for returforsendelse
1 Cool Transport Container-kjøleboks (til serumrør gul kork)	

Før prøvetaking

1. **Prøven skal tas fastende.** Det vil si at du bør faste fra kl 22:00 kvelden før prøvetakingen. Du kan drikke litt vann på morgenen før prøvetaking.
2. Ta ut prøveglassene fra kjøleboksen før den fryses. Prøveglassene kan du oppbevare i romtemperatur.
3. Husk å fryse ned Cool Transport Container med en gang du mottar utstyret (minst 8 timer før forsendelse). **VIKTIG!** Denne må **fryses liggende!**
4. Ta med den frosne kjøleboksen, isoporesken og prøveglasset dit du skal ta prøven.
5. Prøvetaking **må** skje på **mandager, tirsdager eller onsdager.**

Prøvetakingen

OBS! Blodprøven tas av kvalifisert personell enten ved et legekantor, klinikk eller et sykehus.

1. Blodprøvene tas på veneblod.
2. Etter at blodprøvene er tatt, bland alle prøverørene godt ved å vippe dem fram og tilbake ca. 10 ganger.
3. EDTA røret (lilla kork) og Na-Fluor røret (rosa kork) skal ikke sentrifugeres, dem skal blandes godt og oppbevares i romtemperatur. **Viktig: røret med lilla kork og rosa kork skal IKKE fryses eller settes til kjøling.** De skal sendes i romtemperatur.
4. 15 minutter etter prøvetaking skal serumrørene med gel (gul kork) sentrifugeres i 10 minutter.
5. Plasser de to sentrifugerte serumrørene i den frosne Cool Transport Containeren og plasser denne i isoporesken. Slå strikken rundt isoporesken og lokket slik at lokket sitter fast til isoporesken (prøvene vil da fryse av seg selv i Cool Transport Containeren). Deretter oppbevares blodprøvene (gul kork) i fryseren din inntil forsendelse.

Retursending

Det er du selv som er ansvarlig for å sende prøvene tilbake til oss.

1. Fyll ut rekvisisjonsskjemaet fullstendig og husk signatur på baksiden. Merk navn og fødselsnummer på prøverørene.

2. EDTA røret (lilla kork) og Na-Flour (rosa kork) legges i transporthylsen og skal **ikke** fryses/kjøles. De oppbevares i romtemperatur. Deretter festes transporthylsene med EDTA røret og Na-Flour utenpå isoporesken med strikk.
3. Legg isoporesken med serumrørene samt rekvisisjonsskjemaet og transporthylsene med blodprøvene inn i DHL-posen og lim igjen posen.
4. Sørg for at blodprøvene blir sendt til Lab1 samme dag som prøvetakingen er utført. Prøvetakingen må skje på mandager, tirsdager eller onsdager.
5. Bestill opphenting fra DHL (les egen instruksjon for returforsendelse til Lab1). Planlegg tidspunktet for retursending. **NB! Retursendinger må skje på mandager, tirsdager eller onsdager.**
6. Pakken er da klar for at DHL kan komme og hente den der du har avtalt henteadresse og tidspunkt.

Hvis mulig kan prøven leveres direkte til Lab1 sitt laboratorium i Sandvika:

Elias Smiths vei 10, inngang D, 1337 Sandvika.