

Les hele instruksjonen nøye før prøvetaking og sjekk at alle punktene er ivarettatt.

Inneholder

1 Beholder med skrukork	1 Rekvisisjonsskjema Lab1
1 Ferdig frankert retureske	1 Forseglingsetikett

Før prøveinnsamling

Du skal **IKKE** smøre flått inn med oljer, fett eller sprit for at den lettere skal slippe taket.

Det virker MOT sin hensikt og forsinker fjerningen!

Prøveinnsamling

1. Bruk gjerne en pinsett og ta tak nede ved huden. Deretter drar du flått raskt rett ut
2. Du kan også bruke hendene eller engangshanske. Vri flått enten til høyre eller venstre før flått dras rett ut. Sørg for å få med både munn og hode hvis dette skulle sitte igjen
3. Vask bittstedet med såpe og legg på litt antibiotikaholdig sårsalve
4. Plasser flått i den medfølgende beholderen. Flått(e) trenger ikke å være hel og det gjør ingenting om flått(e) er i flere deler

Retursending

Det er du selv som er ansvarlig for å sende prøvene tilbake til oss.

1. Fyll ut Lab1 rekvisisjonsskjemaet
2. Plasser beholderen og rekvisisjonsskjemaet i den ferdig frankerte returesken og forsegl den med forseglingsetiketten
3. Returesken er nå klar til å sendes fra ditt lokale postkontor/post i butikk/postkasse

Hvis mulig kan prøven leveres direkte til Lab1 sitt laboratorium i Sandvika:
Elias Smiths vei 10, inngang D, 1337 Sandvika.